



PROSEPT[®] Burs

Application Steps



1 安全のためグローブとマスクを着用下さい。



2 専用容器に原液を150ml入れて蓋を閉めて下さい。



3 蓋の表面にある小さな穴から使用後のバーやファイルを入れ下さい。感染を防ぐためピンセットをお使い下さい。



4 必要時間放置して下さい。必要時間以上の浸漬はしないで下さい。



5 消毒後のバーやファイルを取り出して下さい。防腐処理済のため水洗せずに自然乾燥して下さい



6 汚れが残っていないか確認し必要なら3からのステップを繰り返して下さい。



7 必要に応じてオートクレーブを使用して下さい。但しオートクレーブを使用する場合は器具の水洗いをお勧めします。