


■ 診察台の組立て手順


昇降台のペダル側と天板の体重計スイッチが合うように

昇降台の4箇所の穴に天板を乗せて、付属のナットを締め付けてください

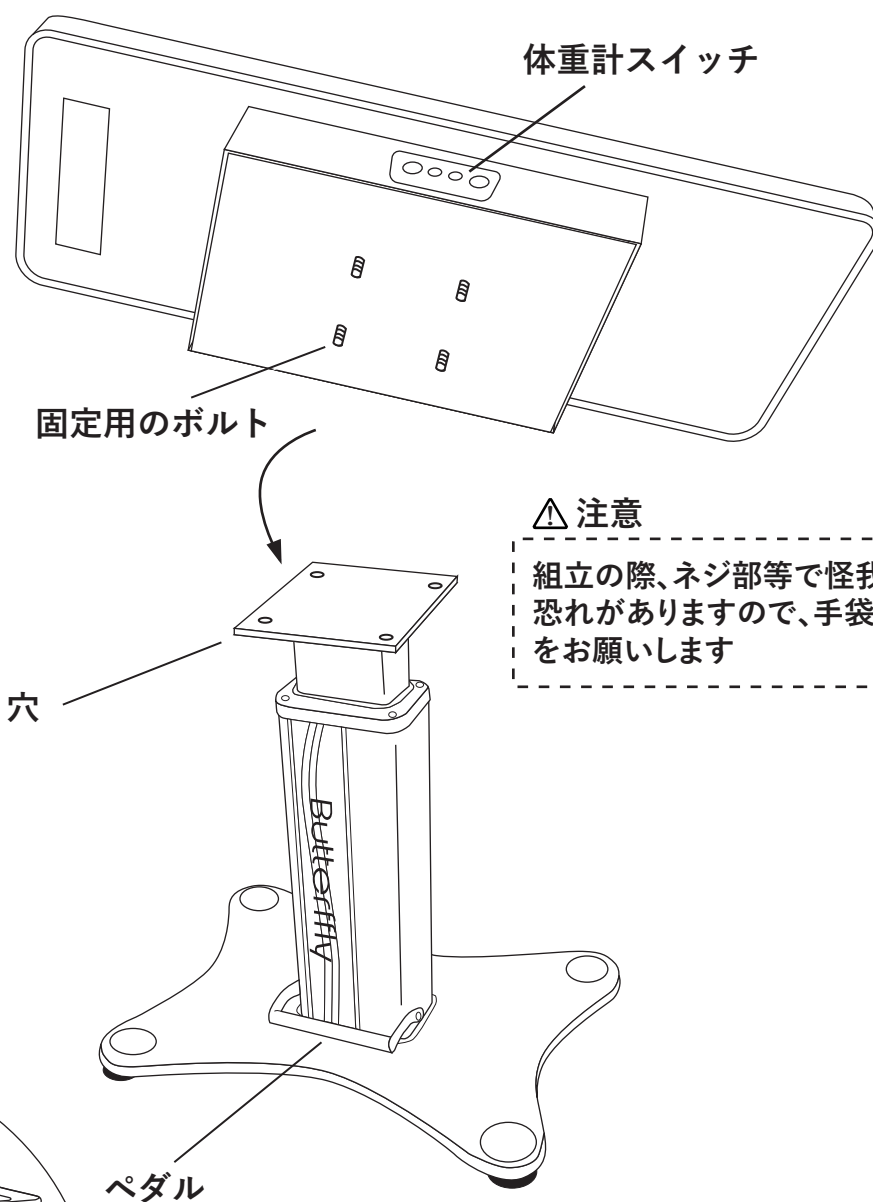

⚠ 注意

組立の際、ネジ部等で怪我をする
恐れがありますので、手袋の着用
をお願いします

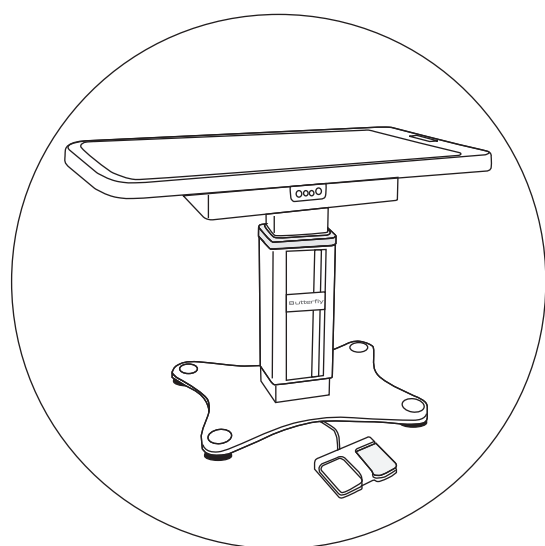

※電動診察台はフットペダル側に
天板の体重計スイッチを合わせてください

Menix 株式会社 **東京メニックス**

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町 2-1442-8

TEL : 04-2923-8841 FAX : 04-2923-8864